

FICHA TECNICA

Designación:

CAJA DE 20 MÁSCARILLAS DE USO UNICO FFP2 CON VÁLVULA

Colores:

Blanco



CE 0194

Descriptivo:

Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida con válvula de exhalación. Forma convexa, lámina nasal de ajuste, refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Caja de 20.

Materiales:

Fibra sintética no tejida
Bandas ajustables

Instrucciones de uso:

Esta máscara está clasificada en función de su eficacia de filtración y de su fuga total máxima hacia el interior. FFP2 : Máscara de protección contra las partículas sólidas y líquidas de toxicidad media. Puede utilizarse para concentraciones que lleguen a alcanzar 10 X el Valor Medio de Exposición (VME). Poder de filtración del medio filtrante: 94% - Factor de protección nominal (NPF) : 12.5

No la utilice durante más de 8 horas seguidas y deséchela después de cualquier uso. Retire la máscara de su embalaje únicamente antes de su uso. Utilicela sólo cuando la concentración de contaminantes no suponga un peligro inmediato para su vida o su salud, y únicamente conforme a las normas aplicables en cuanto a salud y seguridad. Antes de utilizar la máscara, compruebe su integridad, su fecha límite de uso (en la parte inferior del embalaje) y que su clase de protección (FFP2) es la adecuada para la aplicación (producto utilizado y concentración).

Límites de uso:

El usuario deberá recibir la formación necesaria para llevar máscara y deberá conocer sus instrucciones de uso antes de utilizarla. Utilizar la máscara en zonas bien ventiladas, con suficiente oxígeno (> a 20%) y que no contengan atmósferas explosivas. La máscara deberá estar correctamente colocada para garantizar el nivel de protección esperado. No utilizar si el vello de la cara (barba, patillas) impide la estanqueidad de la máscara o si se detecta una fuga.

En caso de tener problemas para respirar y/o de sentir mareos o malestar, abandonar el lugar de inmediato. No modificar esta máscara de ningún modo y desecharla si está dañada.

El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar gravemente la salud del usuario y exponerlo a serios problemas, incluso poner su vida en peligro. Mascarilla limitada a una utilización para un solo turno de trabajo. No utilizar fuera de su ámbito de uso definido en las instrucciones que aparecen a continuación. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. En este caso, abandone la zona de riesgo, quítese la máscara y consulte a un médico.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Esta máscara es apta para un sólo uso (no precisa mantenimiento).

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN149:2001 (Factor de protección nominal : 10 x VME (Valor Medio de Exposición) para partículas de baja a media toxicidad).

FICHA TECNICA

Designación:

CAJA DE 20 MÁSCARILLAS DE USO UNICO FFP3 CON VÁLVULA

Colores:

Blanco



CE 0194

Descriptivo:

Mascarilla facial filtrante FFP3 de fibra sintética no tejida con válvula de exhalación. Forma convexa, juego de bandas anchas ajustables, lámina nasal de ajuste, refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Caja de 20.

Materiales:

Fibra sintética no tejida

Juego de bandas anchas ajustables

Instrucciones de uso:

Esta máscara está clasificada en función de su eficacia de filtración y de su fuga total máxima hacia el interior. FFP3 : Máscara de protección contra las partículas sólidas y líquidas de alta toxicidad. Puede utilizarse para concentraciones que lleguen a alcanzar 20 X el Valor Medio de Exposición (VME). Poder de filtración del medio filtrante: 99% - Factor de protección nominal (NPF) : 50

No la utilice durante más de 8 horas seguidas y deséchela después de cualquier uso. Retire la máscara de su embalaje únicamente antes de su uso. Utilícela sólo cuando la concentración de contaminantes no suponga un peligro inmediato para su vida o su salud, y únicamente conforme a las normas aplicables en cuanto a salud y seguridad. Antes de utilizar la máscara, compruebe su integridad, su fecha límite de uso (en la parte inferior del embalaje) y que su clase de protección (FFP3) es la adecuada para la aplicación (producto utilizado y concentración).

Límites de uso:

El usuario deberá recibir la formación necesaria para llevar máscara y deberá conocer sus instrucciones de uso antes de utilizarla. Utilizar la máscara en zonas bien ventiladas, con suficiente oxígeno (> a 20%) y que no contengan atmósferas explosivas. La máscara deberá estar correctamente colocada para garantizar el nivel de protección esperado. No utilizar si el vello de la cara (barba, patillas) impide la estanqueidad de la máscara o si se detecta una fuga.

En caso de tener problemas para respirar y/o de sentir mareos o malestar, abandonar el lugar de inmediato. No modificar esta máscara de ningún modo y desecharla si está dañada.

El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar gravemente la salud del usuario y exponerlo a serios problemas, incluso poner su vida en peligro. Mascarilla limitada a una utilización para un solo turno de trabajo. No utilizar fuera de su ámbito de uso definido en las instrucciones que aparecen a continuación. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. En este caso, abandone la zona de riesgo, quítese la máscara y consulte a un médico.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original.

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Esta máscara es apta para un sólo uso (no precisa mantenimiento).

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN149:2001 (Factor de protección nominal : 20 x VME (Valor Medio de Exposición) para partículas de alta toxicidad tal cual plomo, cuarzo y cromatos).